


TEST DE DROGAS EN ORINA

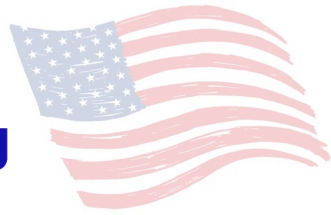

Detección	5 parámetros
Tipos de drogas	COC/THC/BZO/OPI/AMP
Tipos de medición	Invasivo exacto
Fecha de vencimiento	2 años
Almacenamiento	2°C a 30 C°
Resultado	> 3 minutos
Incluye manual	Manual Test
Sellado	Hermético
Diagnostico	Uso forense
Incluye	Test cassette

Resultados al instante:

Las Los test de drogas de orina tipo panel son muy utilizados en centros médicos, hospitales, mineras, constructoras, etc. Para la detección de drogas de un máximo hasta 7 días.

Nombre droga	Sigla	Nivel Corteng/ml	Tiempo de detección	
			Mínimo	Máximo
Cocaína	COC	300	1-4 horas	2-4 días
Marihuana	THC	50	2 horas	Hasta 7 días
Opiáceos	OPI	2000	2 horas	1-3 días
Anfetaminas	AMP	1000	2-7 horas	1-2 días
Benzodiacepinas	BZO	300	2-7 horas	1-4 días

MODO DE USO:

Permita que la prueba, la muestra de orina, y/o los controles estén a temperatura ambiente (15-30°C) antes de realizar la prueba.

1 Tome la muestra de orina

2 Quite la tapa de la prueba. Apuntando con las flechas hacia la muestra de orina, introduzca el panel de la prueba verticalmente en la misma hasta la zona señalada por líneas onduladas, manteniéndolo durante al menos 10-15 segundos. Tenga cuidado de no sobrepasar las flechas de la prueba al introducirlo en la muestra de orina.

Lea los resultados después de 5 minutos. No interpretar resultados pasados 10 minutos

